

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



 **Orlett**[®]
вернет радость движения

Инструкция по применению ортопедических изделий

Medical Line



**Бандаж
на шейный отдел позвоночника
(шина Шанца)**

БН6-53



Уважаемый покупатель!

Производитель российских ортопедических изделий ООО «ТРЕЛАКС» благодарит Вас за то, что Вы выбрали нашу продукцию.

Российская компания «ТРЕЛАКС» разрабатывает и производит широкий ассортимент ортопедических медицинских изделий для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательной системы у взрослых и детей.

Внедрение современных принципов контроля качества производства и конечной продукции на динамично развивающемся отечественном производстве позволило выпускать серию ортопедических изделий под торговой маркой Orlett.

В производстве бандажей Orlett на шейный отдел позвоночника (шины Шанца) используются современные гипоаллергенные безопасные материалы: качественный эластичный пенополиуретан, трикотажные ткани с содержанием вискозы, 100% хлопок и др.

Качество бандажей Orlett на шейный отдел позвоночника подтверждено Сертификатом соответствия Госстандарта России. Изделия зарегистрированы в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития как изделия медицинского назначения.

На все изделия Orlett (шины Шанца) предоставляется гарантия сохранения лечебного эффекта изделий в течение 6 месяцев при ежедневном использовании.

Бандажи Orlett на шейный отдел позвоночника (шины Шанца) представлены изделиями для взрослых, детей старше 1 года и детей до 1 года.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Относительные ограничения и противопоказания к применению бандажей Orlett (шин Шанца):

- индивидуальная непереносимость материалов бандажа для шейного отдела;
- острые заболевания кожи в области применения изделия;
- открытые раны в области применения изделия.

Бандаж Orlett на шейный отдел позвоночника для взрослых, арт. БН6-53

Артикулы (индексы): БН6-53, (БН6-53-8, БН6-53-9, БН6-53-10, БН6-53-11, БН6-53-12).

Основа: 100% пенополиуретан.

Чехол: 90% вискозы, 10% лайкры.

Бандаж Orlett на шейный отдел позвоночника для детей старше 1-го года, арт. БН6-53

Артикулы (индексы): БН6-53, (БН6-53-6, БН6-53-7).

Основа: 100% пенополиуретан.

Чехол: 100% хлопок.

Бандаж Orlett на шейный отдел позвоночника для детей до 1-го года, арт. БН6-53

Артикулы (индексы): БН6-53, (БН6-53-4, БН6-53-5).

Основа: 100% пенополиуретан.

Чехол: 100% хлопок.

Подбор размера бандажей Orlett.

Для корректного подбора бандажа Orlett на шейный отдел необходимо измерить сантиметровой лентой два параметра: окружность и высоту шеи. Первый параметр измеряется по длине окружности шеи у ее основания. Для определения второго параметра необходимо в вертикальном положении головы измерить расстояние от угла нижней челюсти до ключицы.

В соответствии с размерными таблицами подбирается нужный артикул (индекс) бандажа Orlett.

Способ применения бандажей Orlett:

Бандаж Orlett на шейный отдел позвоночника (шину Шанца) размещают у передней поверхности шеи так, чтобы подбородок расположился в выемке по середине верхнего края шины Шанца. Шину застёгивают на задней поверхности шеи с помощью застёжки-липучки «Велкро», обеспечив плотное прилегание бандажа Orlett к коже по всей окружности шеи.

Внимание! При появлении дискомфорта в области применения бандажа следует немедленно прекратить использование изделия и проконсультироваться с врачом относительно его дальнейшего применения.

Режим и сроки ношения бандажей Orlett на шейный отдел позвоночника.

Режим и сроки ношения бандажей Orlett (шин Шанца) назначает лечащий врач.

Бандаж Orlett на шейный отдел позвоночника (шина Шанца) для взрослых, арт. БН6-53

Артикулы (индексы):

БН6-53-8-1, БН6-53-8-2, БН6-53-9-1, БН6-53-9-2,
 БН6-53-10-1, БН6-53-10-2, БН6-53-11-1, БН6-53-11-2,
 БН6-53-12-1, БН6-53-12-2.



Таблица размеров для подбора бандажа Orlett на шейный отдел для взрослых.

Артикул/индекс	Размеры (см)	
	Окружность	Высота
БН6-53-8-1	30-35	8
БН6-53-8-2	35-45	8
БН6-53-9-1	30-35	9
БН6-53-9-2	35-45	9
БН6-53-10-1	30-35	10
БН6-53-10-2	35-45	10
БН6-53-11-1	30-35	11
БН6-53-11-2	35-45	11
БН6-53-12-1	30-35	12
БН6-53-12-2	35-45	12

Назначение/показания к применению бандажа Orlett на шейный отдел позвоночника:

- болевые ощущения в шее;
- комплексное лечение головной боли, головокружения;
- состояния после инсультов (симптомы нарушения кровотока по позвоночным артериям);
- комплексное лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника (после массажа, физиотерапевтического лечения, лечебной физкультуры);
- состояния после травм и операций шейного отдела позвоночника;
- повышенная подвижность позвонков в шейном отделе;
- нарушения тонуса мышц шеи;
- профилактика заболеваний шейного отдела позвоночника при длительном напряжении мышц шеи и надплечий (при работе за компьютером, при длительных поездках в транспорте и др.);
- фиксация после обширных повреждений мягких тканей шеи (профилактика рубцовой деформации);
- шейный миозит;
- шейный корешковый синдром.

Оказываемые эффекты бандажа Orlett:

- стабилизация и разгрузка шейного отдела позвоночника;
- ограничение подвижности в шейном отделе позвоночника;
- фиксация положения головы и шеи в положении, снижающем нагрузки на мышцы и связочный аппарат;
- уменьшение напряжения мышечных групп шеи и надплечья;
- улучшение кровообращения головы и шеи;
- легкий теплосберегающий эффект тканей шейного отдела.

Бандаж Orlett на шейный отдел позвоночника для детей старше 1-го года.

Артикулы (индексы): БН6-53-6, БН6-53-7.



Таблица размеров для подбора бандажа Orlett на шейный отдел для детей старше 1-го года.

Артикул/индекс	Размеры (см)	
	Окружность	Высота
БН6-53-6	20-32	6
БН6-53-7	20-32	7

Назначение/показания к применению бандажа Orlett на шейный отдел позвоночника:

- нарушения тонуса мышц шеи;
- повышенная подвижность позвонков в шейном отделе;
- состояния после травм и операций шейного отдела позвоночника;
- комплексное лечение головной боли, головокружения;
- комплексное лечение нарушений осанки и искривлений в шейном и верхне-грудном отделах позвоночника;
- закрепление лечебного эффекта после массажа, физиотерапевтического лечения, лечебной физкультуры;
- профилактика заболеваний шейного отдела позвоночника при длительном напряжении мышц шеи и надплечий (в школе, при подготовке домашних заданий, работе за компьютером, при длительных поездках в транспорте и др.).

Оказываемые эффекты бандажа Orlett:

- стабилизация и разгрузка шейного отдела позвоночника;
- ограничение подвижности в шейном отделе позвоночника;
- фиксация положения головы и шеи в положении, снижающем нагрузки на мышцы и связочный аппарат;
- уменьшение напряжения мышечных групп шеи и надплечья;
- улучшение кровообращения головы и шеи;
- легкий теплосберегающий эффект тканей шейного отдела.

Бандаж Orlett на шейный отдел позвоночника для детей до 1-го года.

Артикулы (индексы): БН6-53-4, БН6-53-5.



Таблица размеров для подбора бандажа Orlett на шейный отдел для детей до 1-го года.

Артикул/индекс	Размеры (см)	
	Окружность	Высота
БН6-53-4	До 25	4
БН6-53-5	До 25	5

Назначение/показания к применению бандажа Orlett на шейный отдел позвоночника:

- мышечная кривошея;
- состояние после травмы в родах;
- нарушения тонуса мышц шеи (гипертонус или гипотонус мышц);
- поддержка шейного отдела позвоночника у ослабленных и недоношенных детей;
- сохранение положения шеи после массажа, мануальной терапии, других лечебных процедур.

Перед применением бандажей Orlett на шейный отдел позвоночника для детей до 1-го года обязательно посоветуйтесь с врачом!

Оказываемые эффекты бандажа Orlett на шейный отдел:


- ограничение подвижности в шейном отделе позвоночника;
- легкий теплосберегающий эффект, способствующий улучшению кровообращения и сокращению сроков выздоровления.

Уход за изделиями Orlett:

Правильный уход за бандажами Orlett на шейный отдел позвоночника, позволяет сохранить лечебные свойства изделий в течение всего гарантийного срока службы изделия.

Правила ухода за бандажами Orlett на шейный отдел позвоночника:

- стирать вручную при температуре не выше +30°C;
- не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор;
- не применять машинную стирку;
- дополнительный чехол можно стирать ежедневно, в том числе в стиральной машине (в режиме деликатной стирки);
- отжимать не выкручивая;
- сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей;
- сушить изделие рекомендуется в расправленном положении на горизонтальной поверхности.

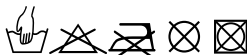

Срок службы:

Не менее 3-х месяцев.

Возможность использования изделия дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования изделия без согласования с лечащим врачом.

Комплектность:

Ортез Orlett, арт. БН6-53-4: ортопедическое изделие арт. БН6-53-4, инструкция по применению.

Ортез Orlett, арт. БН6-53-5: ортопедическое изделие арт. БН6-53-5, инструкция по применению.

Ортез Orlett, арт. БН6-53-6: ортопедическое изделие арт. БН6-53-6, инструкция по применению.

Ортез Orlett, арт. БН6-53-7: ортопедическое изделие арт. БН6-53-7, инструкция по применению.

Ортез Orlett, арт. БН6-53-8-1: ортопедическое изделие арт. БН6-53-8-1, инструкция по применению.

Ортез Orlett, арт. БН6-53-8-2: ортопедическое изделие арт. БН6-53-8-2, инструкция по применению.

Ортез Orlett, арт. БН6-53-9-1: ортопедическое изделие арт. БН6-53-9-1, инструкция по применению.

Ортез Orlett, арт. БН6-53-9-1: ортопедическое изделие арт. БН6-53-9-2, инструкция по применению.

Ортез Orlett, арт. БН6-53-10-1: ортопедическое изделие арт. БН6-53-10-1, инструкция по применению.

Ортез Orlett, арт. БН6-53-10-2: ортопедическое изделие арт. БН6-53-10-2, инструкция по применению.

Ортез Orlett, арт. БН6-53-11-1: ортопедическое изделие арт. БН6-53-11-1, инструкция по применению.

Ортез Orlett, арт. БН6-53-11-2: ортопедическое изделие арт. БН6-53-11-2, инструкция по применению.

Ортез Orlett, арт. БН6-53-12-1: ортопедическое изделие арт. БН6-53-12-1, инструкция по применению.

Ортез Orlett, арт. БН6-53-12-2: ортопедическое изделие арт. БН6-53-12-2, инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции и правил эксплуатации банджа.

Срок годности:

Срок годности не установлен.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Условия хранения:

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

Информация для покупателя:

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены. Изделие предназначено для многократного личного использования. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ:**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____

Изготовитель: ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308,
г. Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58,
ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: +7 (499) 257-45-81
ТУ № 9396-001-88419706-2008

Товар является медицинским изделием. Отпускается без рецепта.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04605 от 01.04.2009 г.
выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,
срок действия не ограничен

Декларация о соответствии № РОСС RU.ИМ08.Д00818
(с 07.07.2014 г. по 06.07.2019 г.) выдана ООО «Медполимер-С»